



Präanalytik | Gynäkologie

ThinPrep® Pap Test


Vorbereitung

- Beschriften Sie das Probenfläschchen mit dem vollständigen Namen und dem Geburtsdatum der Patientin
- Reinigen Sie vor der Entnahme die Zervix optimal von übermässigem Schleim und Detritus


Wichtige Hinweise

- Niemals einen Holzspatel oder Watteträger verwenden
- Kein Gleitmittel verwenden
- Das Probenentnahmeinstrument nicht im Fläschchen belassen
- Den Borstenkopf des Zervix-Brush nicht im Fläschchen zurücklassen


Vorgehen

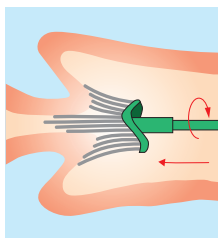


- Entnahme einer ausreichenden Probe vom Gebärmutterhals mit dem Zervix-Brush
- Die mittleren Borsten der Bürste tief genug in den Zervikalkanal einführen, damit die kürzeren Borsten vollständig die Ektozervix berühren
- Mit leichtem Druck das Probenentnahmeinstrument fünfmal im Uhrzeigersinn drehen

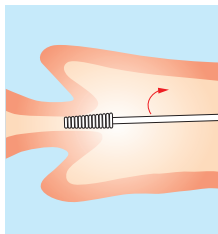

- Bei engem Zervikal-Kanal sollte zusätzlich eine endozervikale Bürste verwendet werden
- Bürste langsam maximal um eine viertel oder halbe Drehung in eine Richtung drehen

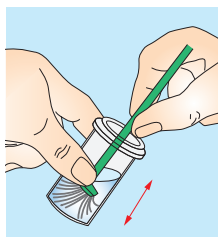

- Zervix-Brush zehnmal bis auf den Boden und nicht an den Rand des Fläschchens drücken (Borsten sollen auseinandergedrückt werden)
- Danach kräftig in der Lösung herumschwenken um weiteres Material abzulösen
- Sichtprüfung des Zervix-Brush auf mögliche Rückstände
- Cave: Den Borstenkopf bitte nicht im Fläschchen zurücklassen

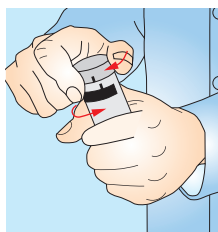

- Zuschrauben des Deckels bis die schwarze Markierungslinie am Deckel die schwarze Markierungslinie am Fläschchen passiert hat (nicht zu stark festdrehen)



Präanalytik | Gynäkologie

ThinPrep® Pap Test



ThinPrep PAP-Test 20 ml

Art. Nr. 02001680



Medscand Kit (Cytobrush & Spatel)

Art. Nr. 02001683



Rovers Cervex Brush

Art. Nr. 02001684



Cytobrush/Celettabrush

Art. Nr. 02001626

> mit Sicherheitsspitze

Art. Nr. 02001627

> ohne Sicherheitsspitze



CombiPlus Brush

Art. Nr. 02001638



CerviBrush + Profile LBC

Art. Nr. 02001637



Cytoprep Brush

Art. Nr. 02001635



Szalay-Cyto-Spatula Nr. 1

Art. Nr. 02001633



Plastikspatel Ayres

Art. Nr. 02001631



Transportbox für 18 Thin Prep leer

Art. Nr. 02001650

Transportbox für 10 Thin Prep leer

Art. Nr. 02001651