

## H\_Wegleitung gynäkologische Zytologie

Das Ziel der gynäkologischen Zytologie mit dem PAP-Abstrich, ist die Entdeckung der asymptomatischen Vorstadien des Zervix-Karzinoms (Vorsorge). Die Qualität der zytologischen Diagnose des PAP-Abstrichs hängt im Wesentlichen von der Qualität des entnommenen Zellmaterials und der richtigen Fixation der Probe ab.

- Wir bieten die Befundung sowohl von konventionellen Abstrichen, wie auch von ThinPrep (flüssigkeits-basierte PAP-Abstriche) an
- Das Verbrauchsmaterial kann kostenlos über unser Institut bezogen werden ([Bestellungen](#))

Postadresse	Pathologie Institut Enge, Postfach, 8031 Zürich
Kurieradresse	Hardturmstrasse 133, 5. Stock, 8005 Zürich, <a href="http://www.patho.ch/">www.patho.ch/</a>
Telefonnummer	Sekretariat: 044/ 287 38 38, Labor: 044/ 287 38 30

### ThinPrep

- Abstrich mit dem Zellmaterial wird mit der Bürste direkt ins flüssige Medium übertragen
- Das Bürstchen muss vollständig von den Zellen im Medium durch kräftiges Spülen im Gefäss befreit werden
- Das Bürstchen NICHT in der Flüssigkeit lassen
- Die HPV-Typisierung kann gleichzeitig oder auch nach Erhalt des Berichtes (innerhalb von 2 Monaten) bestellt werden



### Konventionelle Abstriche

- Abstrich mit dem Zellmaterial wird mit dem Plastik-Spatel, bzw. Bürste auf dem Objektträger ausgestrichen (dünn und gleichmässig)
- Schnelles fixieren ist wichtig!
  - entweder in einer Küvette mit 96% Alkohol oder
  - mit dem Spray (→ trocknen lassen → versenden)
- Keine nachträgliche HPV-Analyse vom selben Material möglich (es muss eine neue Probe entnommen werden)

### Generelle Bemerkungen

- Abnahme bevorzugt NICHT während der Monatsblutung
- Zervix vor dem Abstrich vom Schleim befreien
- Richtiges (inkl. Grösse) Entnahme-Instrument auswählen (Cervix-Brush für ThinPrep, Plastik-Spatel und / oder Cyto-Brush für konventionelle Abstriche)  
→ Holzspatel oder Wattestäbchen NICHT benutzen (schlechte Qualität und Zellmaterial-Verlust)
- Die Berichte werden in der [Bethesda und München III-Nomenklatur](#) formuliert
- Die Qualitätsstandards umfassen eine enge Korrelation mit den histologischen Befunden (vor allem möglich, wenn diese in unserem Institut untersucht werden) und den statistischen Analysen
- Aus abrechnungstechnischen Gründen (TARMED), ist die Angabe auf dem Anmeldeformular, ob die PAP-Abstrich-Abnahme im Rahmen der Vorsorge- oder der Kontroll-Untersuchung erfolgt, notwendig

**Bitte zögern Sie nicht, uns bei allfälligen Fragen zu kontaktieren! Telefon 044/ 287 38 38**